

Условия хранения контрольных материалов и калибраторов для проведения иммунохимических исследований

Таблица составлена на основе инструкций компании Рош (данные актуальны на июль 2023 г.) для анализаторов cobas e 411, cobas e 601 / 602 и cobas e 801. Новые версии инструкций к тестам могут содержать обновлённую или дополненную информацию по ожидаемым значениям.

Важно: восстановленные калибраторы и контроли могут быть использованы на борту анализатора только один раз. В случае хранения при температуре -20°C допускается только однократная заморозка.

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
Щитовидная железа	TSH 08429324190, 08443432190	e411: 1820 e601/e602: 627 e801: 10172	TSH 08443459190	x	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
	T3 09007725190, 09007733190	e411: 050 e601/e602: 007 e801: 10032	T3 11731548122	15	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
	FT3 III 09005803190, 09005811190	e411: 1240 e601/e602: 195 e801: 10082	FT3 09077871190	15	56	x	Universal 11731416190	30	3	28
	T4 09007741190, 09007784190	e411: 021 e601/e602: 002 e801: 10120	T4 12017717122	x	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
	FT4 IV 09043276190, 09043284190	e411: 1610 e601/e602: 309 e801: 10160	FT4 09043292190	x	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
	T-Uptake 11731394122, 07028105190	e411: 040 e601/e602: 008 e801: 10051	T-Uptake 06528309190	15	84	84	Universal 11731416190	30	3	28

* см. инструкцию

л – лиофилизат x – жидкость

✓ - входит в состав набора реагентов

x – хранение недопустимо

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	Tg II 09043276190, 08906564190	e411: 2400 e601/e602: 005 e801: 10215	Tg II 08991405190	15	21	93	Universal 11731416190	30	x [!]	28
	Anti-TPO 06368590190, 07026935190	e411: 720 e601/e602: 137 e801: 10066	Anti-TPO 06472931190	15	8 ч	56	ThyroAB 05042666191	30	3	28
	Anti-Tg 06368697190, 07026919190	e411: 710 e601/e602: 133 e801: 10065	Anti-Tg 06368603190	15	42	x	ThyroAB 05042666191	30	3	28
	Anti-TSHR 08496609190, 08496633190	e411: 1830 e601/e602: 488 e801: 10174	Anti-TSHR 08496641190	15	x	84	ThyroAB 05042666191	30	x [!]	28
Паращитовидная железа	PTH 11972103122	e411: 680 e601/e602: 126	PTH 08243875190	15	14	84	Varia 05618860190	30	3	31
	PTH STAT 04892470190	e411: 840 e601/e602: 221	PTH STAT 08243930190	15	14	84	Varia 05618860190	30	3	31
	PTH (1-84) 05608546190	e411: 930 e601/e602: 273	PTH (1-84) 05608554190	15	5	90	Varia 05618860190	30	3	31
Репродуктивная функция	AMH Plus 08818061190, 08818916190	e411: 1590g e601/e602: 472 e801: 10158	AMH Plus 07957203190	15	1	28	AMH Plus 07957211190	15	x	28
	LH 11732234122, 07027575190	e411: 140 e601/e602: 020 e801: 10113	LH II 03561097190	15	x	84	Universal 11731416190	30	3	28
	FSH 08932352190, 08932387190	e411: 2350 e601/e602: 99 e801: 10207	FSH II 08932417190	15	x	84	Universal 11731416190	30	3	28
	Estradiol III 06656021190, 07027249190	e411: 1370 e601/e602: 223 e801: 10100	Estradiol III 06656048190	15	1	31	Universal 11731416190	30	3	28

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

✓ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	Prolactin II 03203093190, 07027737190	e411: 131 e601/e602: 014 e801: 10111	Prolactin II 03277356190	15	x	84	Universal 11731416190	30	3	28
	Progesterone III 07092539190, 07027699190	e411: 1380 e601/e602: 235 e801: 10045	Progesterone III 07092547190	15	1	31	Universal 11731416190	30	3	28
	Testosterone II 05200067190, 07027915190	e411: 111 e601/e602: 216 e801: 10020	Testosterone II 05202230190	15	x	84	Universal 11731416190	30	3	28
	SHBG 03052001190, 07258496190	e411: 750 e601/e602: 146 e801: 10071	SHBG 03052028190	15	x	56	Universal 11731416190	30	3	28
Гормон роста	hGH 05390125190, 07027486190	e411: 890 e601/e602: 263 e801: 10096	hGH 05390133190	15	3	31	Multimarker 05341787190	30	3	31
Мониторинг беременности	HCG STAT 08890587190, 08890595190	e411: 2310 e601/e602: 87 e801: 10203	HCG STAT 09013296190	15	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
	free βhCG 08860297190	e411: 690 e601/e602: 033	free βhCG 04854080200	15	42	84	Maternal Care 08740062190	30	56	84
	PAPP-A 08860173190	e411: 290 e601/e602: 211	PAPP-A 04854101200	15	x	84	Maternal Care 08740062190	30	56	84
	sFLT-1 05109523190	e411: 830 e601/e602: 096	sFlt-1 05109531190	15	x	28	Multimarker 05341787190	30	3	31
	PIGF 05144671190	e411: 820 e601/e602: 083	PIGF 05144701190	15	x	28	Multimarker 05341787190	30	x [!]	31
Диабет	Insulin 12017547122, 07027559190	e411: 650 e601/e602: 120 e801: 10059	Insulin 12017504122	15	x	84	Multimarker 05341787190	30	3	31
							Universal 11731416190	30	x [!]	28

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

✓ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

3

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	C-Peptide 03184897190	e411: 070 e601/e602: 186	C-Peptide 03184919190	15	x	28	Multimarker 05341787190	30	3	31
Надпочечники	Cortisol II 06687733190, 07027150190	e411: 1280 e601/e602: 089 e801: 10042	Cortisol II 06687750190	15	x	84	Universal 11731416190	30	3	28
	DHEAs 03000087122, 07027192190	e411: 740 e601/e602: 142 e801: 10068	DHEAs 03000095122	15	x	84	Universal 11731416190	30	3	28
	ACTH 03255751190, 07026684190	e411: 080 e601/e602: 162 e801: 10072	ACTH CalSet 03255760190	15	x	28	Multimarker 05341787190	30	3	31
Онкомаркеры	HCG+β 03271749190, 07251025190	e411: 761 e601/e602: 148 e801: 10072	HCG+β 03302652190	15	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
							Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	AFP 04481798190/ 04491742190, 07026706190	e411: 311 e601/e602: 050 e801: 10121	AFP CalSet II 04487761190	15	42	84	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
							Universal 11731416190	30	3	28
	total PSA 08791686190/ 08791716190, 08791732190	e411: 2120 e601/e602: 499 e801: 10185	total PSA II 08838534190	15	42	84	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	free PSA 08828601190, 08828610190	e411: 2140 e601/e602: 751 e801: 10188	free PSA 08851964190	x	84	x	Tumor Marker 11776452122	30	14	28

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

✓ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	CA 125 II 11776223190, 07026986190	e411: 341 e601/e602: 053 e801: 10018	CA 125 II 07030207190	15	84	140	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	CA 15-3 II 03045838122, 07027001190	e411: 332 e601/e602: 052 e801: 10002	CA 15-3 II 03045846122	x	84	x	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	CA 19-9 11776193122	e411: 351 e601/e602: 054	CA 19-9 11776215122	15	28	56	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	CA 72-4 11776258122	e411: 360 e601/e602: 055	CA 72-4 11776274122	15	42	x	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	CEA 11731629322/ 04491777190, 07027079190	e411: 301 e601/e602: 049 e801: 10003	CEA 11731645322	x	84	x	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	HE4 05950929190, 07027478190	e411: 1000 e601/e602: 281 e801: 10102	HE4 05950945190	15	7	56	HE4 05950953190	15	14	28
	Cyfra 21-1 11820966122, 07299966190	e411: 370 e601/e602: 063 e801: 10030	CYFRA 21-1 11820974322	15	56	x	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
							Lung Cancer 07360070190	15	7	28
Онкомаркеры	Ferritin 03737551190/ 04491785190, 07027273190	e411: 381 e601/e602: 067 e801: 10034	Ferritin 03737586190	x	84	x	Varia 05618860190	30	3	31
							Tumor Marker 11776452122	30	14	28
	NSE 12133113122, 07299982190	e411: 770 e601/e602: 155 e801: 10073	NSE 12133121122	15	42	x	Tumor Marker 11776452122	30	14	28
							Lung Cancer 07360070190	15	7	28
	S100 08817278190, 08817324190	e411: 780 e601/e602: 025 e801: 10118	S100 03289834190	15	28	84	Universal 11731416190	30	3	28

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

✓ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	Calcitonin 06445853190	e411: 1050 e601/e602: 502	Calcitonin 06445861190	15	3	84	Varia 05618860190	30	3	31
	proGRP 09007636190, 09007695190	e411: 1120 e601/e602: 557 e801: 10108	proGRP 06505970190	15	x	56	proGRP 09007636190	15	14	28
							Lung Cancer 07360070190	15	7	28
	SCC 07126972190	e411: 1390 e601/e602: 164	SCC 07126999190	15	28	28	Lung Cancer 07360070190	15	7	28
Кардиология	Troponin I 05094810190	e601/e602: 204	Troponin I 05094828190	60	4	84	Troponin 05095107190	60	4	84
	Troponin I STAT 05094798190	e411: 860 e601/e602: 113	Troponin I STAT 05094801190	60	4	84	Troponin 05095107190	60	4	84
	Troponin T hs 09315322190, 09315357190	e411: 2590 e601/e602: 576 e801: 10239 e801(STAT): 10239	Troponin T hs 09315365190	15	14	84	Troponin 05095107190	60	4	84
	Troponin T hs STAT 08469814190	e411: 090 e601/e602: 107	Troponin T hs STAT 05092736190	15	14	84	Troponin 05095107190	60	4	84
	CK-MB 05894808190	e411: 231 e601/e602: 043	CK-MB 05957664190	15	14	84	Cardiac II 04917049190	15	3	84
	CK MB STAT 05957648190	e411: 211 e601/e602: 118	CK-MB STAT 05957656190	15	14	84	Cardiac II 04917049190	15	3	84
	Myoglobin 12178214122	e411: 240 e601/e602: 056	Myoglobin 12178222122	x	84	x	Cardiac II 04917049190	15	3	84
	Myoglobin STAT 11820788122	e411: 250 e601/e602: 163	Myoglobin STAT 11820893122	x	84	x	Cardiac II 04917049190	15	3	84
	proBNP II 08836736190, 08836752190	e411: 2270 e601/e602: 117 e801: 10199 e801(STAT): 10200	proBNP II 08884234190	15	x	84	Cardiac II 04917049190	15	3	84

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

✓ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
Кардиология	Digoxin 11820796190	e411: 620 e601/e602: 115	Digoxin 11820907322	x	56	x	Cardiac II 04917049190	15	3	84
Анемия	Vitamin B12 II 07212771190, 07028121190	e411: 1410 e601/e602: 224 e801: 10088	Vitamin B12 II 07212780190	15	3	84	Varia 05618860190	30	3	31
	Folate III 07559992190, 07027290190	e411: 1520 e601/e602: 721 e801: 10010	Folate III 07560001190, 07396473190	30	3	84	Varia 05618860190	30	3	28
	Folate RBC 05944295190	e411: 1210 e601/e602: 272	Folate RBC 05944309190	30	3	84	x			
Аллергия	IgE II 04827031190	e411: 630 e601/e602: 116	IgE 11930427122	x	84	x	Universal 11731416190	30	3	28
Костный обмен	N-MID Osteocalcin 12149133122, 07027591190	e411: 660 e601/e602: 122 e801: 10060	N-MID Osteocalcin 11972111122	15	7	84	Varia 05618860190	30	3	31
	b-CrossLaps 09005773190, 09005781190	e411: 670 e601/e602: 127 e801: 10062	b-CrossLaps 11972316122	x	84	x	Varia 05618860190	30	3	31
	total P1NP 03141071190	e411: 190 e601/e602: 044	total P1NP 03141080190	15	7	84	Varia 05618860190	30	3	31
	Vitamin D Total III 09038078190, 09038086190	e411: 2200 e601/e602: 800 e801: 10194	Vitamin D Total 09038116190	15	3	84	PreciControl Vitamin D 09038124190	15	3	31

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

✓ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
Артрит	Anti-CCP 05031656190	e411: 810 e601/e602: 202	√	15	x	28	Anti-CCP 05031664190	15	x	28
Сепсис	IL-6 09015604190, 09015612190	e411: 590 e601/e602: 203 e801: 10085	IL-6 05109469190	15	5 часов	84	Multimarker 05341787190	30	3	31
	BRAHMS PCT 08828644190, 08828679190	e411: 1710 e601/e602: 487 e801: 10161	√	15	x	84	√	15	x	84
Иммуно-супрессоры	Cyclosporin 05889014190, 07251246190	e411: 1160 e601/e602: 705 e801: 10109	Cyclosporin* 05889022190	30	7	28	ISD*	x	7	28
	Sirolimus 06327974190	e411: 1180 e601/e602: 485	Sirolimus* 06327982190	30	7	28	ISD*	x	7	28
	Tacrolimus 05889057190	e411: 1070 e601/e602: 556	Tacrolimus* 05889065190	30	7	28	ISD*	x	7	28
	Everolimus 06633188190	e411: 1030 e601/e602: 486	Everolimus* 06633196190	30	7	28	Everolimus* 07294131190	30	7	28
Инфекции	Anti-HAV IgM 11820591122, 07026773190	e411: 480 e601/e602: 085 e801: 10162	√	x	56	x	Anti-HAV IgM 11876368122	x	56	x
	Anti-HBc II 07374160190/ 07394764190	e411: 1460 e601/e602: 715	√	x	56	x	Anti-HBc 04927931190	x	56	x
	Anti-HBc IgM 11820567122	e411: 460 e601/e602: 086	√	x	56	x	Anti-HBc IgM 11876333122	x	56	x
	Anti-HBe 11820613122, 07026838190	e411: 430 e601/e602: 066 e801: 10033	√	x	56	x	Anti-HBe 11876384122	x	56	x
	Anti-HBs II	e411: 1840 e601/e602: 765	√	x	56	x	Anti-HBs	x	56	x

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

√ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	08498598190, 08498610190	e801: 10179					11876317122			
	Anti-HCV II 06368921190, 07026889190	e411: 1020 e601/e602: 286 e801: 10104	√	x	56	x	Anti-HCV 03290379190	x	56	x
	Anti-SARS CoV-2 Antigen 09345272190, 09345299190	e411: 2560 e601/e602: 072 e801: 10231	√	x	31	x	Anti-SARS-CoV-2 09216928190	x	28	x
	Anti-SARS CoV-2 S 09289267190	e411: 2550 e601/e602: 071	Anti-SARS-CoV-2 S 09289291190	15	14	42	Anti-SARS-CoV-2 S 09289313190	x	7	28
	CMV IgG 04784596190, 07027117190	e411: 570 e601/e602: 009 e801: 10070	√	x	56	x	CMV IgG 04784600190	x	56	x
	CMV IgG Avidity 05909708190	e411: 640 e601/e602: 030	√	x	56	x	CMV IgG Avidity 05942322190	15	28	84
	CMV IgM 04784618190, 07027133190	e411: 580 e601/e602: 011 e801: 10087	√	x	56	x	CMV IgM 04784626190	x	56	x
Инфекции	HBeAg 11820583122, 07027427190	e411: 440 e601/e602: 073 e801: 10036	√	x	56	x	HBeAg 11876376122	x	56	x
	HBsAg II quant II 08814899190, 08814872190	e411: 2110 e601/e602: 131 e801: 10055	√	x	56	x	HBsAg II 07143745190	x	56	x
	HIV combi PT 08924163190	e411: 2250 e601/e602: 225	√	15	84	x	HIV Gen II 06924107190	15	56	84
	HIV Duo 08836973190	e801: 12018	√	15	84	x	HIV Gen II 06924107190	15	56	84
	HSV-1 IgG	e411: 910 e601/e602: 269	√	15	14	28	HSV	15	14	28

* см. инструкцию

! – стабильность снижена

√ - входит в состав набора реагентов x – не применимо

	Название теста ¹	ACN	Калибратор	Восстановление, мин.	2-8°C, дн.	-20°C, дн.	Контроль PreciControl	Восстановление, мин	2-8°C, дн.	-20°C, дн.
	05572185190, 07027494190	e801: 10098					05572207190			
	HSV-2 IgG 05572193190, 07027508190	e411: 920 e601/e602: 270 e801: 10099	√	15	14	28	HSV 05572207190	15	14	28
	Rubella IgG 04618793190, 07027770190	e411: 540 e601/e602: 105 e801: 10024	√	x	56	x	Rubella IgG	x	56	x
	Rubella IgM 04618831190, 07027796190	e411: 550 e601/e602: 106 e801: 10021	√	x	56	x	Rubella IgM	x	56	x
	Toxo IgG 04618815190, 07028008190	e411: 520 e601/e602: 098 e801: 10047	√	x	56	x	Toxo IgG	x	56	x
	Toxo IgG Avidity 05802571190, 07027974190	e411: 940 e601/e602: 713 e801: 11004-11006	√	x	56	x	Toxo IgG Avidity 05802580190	x	56	x
	Toxo IgM 04618858190, 07028024190	e411: 530 e601/e602: 095 e801: 10016	√	x	56	x	Toxo IgM	x	56	x

Ссылки

¹ Наборы реагентов, калибраторов контрольных сывороток, используемые в данном материале, разрешены к применению на территории РФ и имеют регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Государственный реестр медицинских изделий: <http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch>.

COBAS является товарным знаком группы компаний Рош.

Все товарные знаки, встречающиеся в настоящем материале, принадлежат группе компаний Рош.

© 2023, ООО «Рош Диагностика Рус»

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2

Бизнес-центр «Вивальди Плаза»

Тел.: +7 495 229 69 99

diagnostics.roche.com